

Colher amostras de sangue na ponta do dedo

Escolha um local da punção diferente para cada teste. Punções repetidas no mesmo local podem provocar inflamação local ou calosidades.

Antes de realizar um teste, lave as mãos e o local da colheita com água morna e sabão. Enxague e seque completamente. Os contaminantes presentes na pele podem afetar os resultados.

1. Fazer a punção no dedo

Segure firmemente o dispositivo de punção contra a parte lateral do seu dedo. Pressione o botão de disparo. Retire o dispositivo de punção do seu dedo.



2. Obter uma gota de sangue arredondada

Aperte e/ou massage suavemente a ponta do dedo até formar uma gota de sangue arredondada.



NOTA: Se o sangue se espalhar ou escorrer, não utilize a amostra. Seque a área e aperte com cuidado para obter outra gota de sangue ou faça a punção num novo local.



Aplique a amostra

Aplique a amostra de sangue seguindo as instruções no seu medidor ou o Guia do sistema para uma aplicação correta da amostra.

Remover a lanceta usada

NOTA: Este dispositivo de punção tem uma função de ejeção, por isso, não tem de puxar a lanceta usada para fora.


1. Retirar a tampa do dispositivo de punção

Retire a tampa rodando-a e puxando-a para fora do dispositivo.



2. Tapar a ponta exposta da lanceta

Antes de retirar a lanceta, coloque o disco protetor da lanceta numa superfície rígida e empurre a ponta da lanceta para dentro do lado plano do disco.

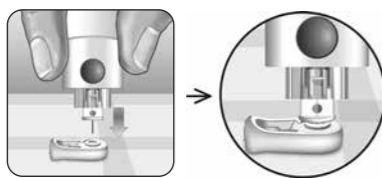


3. Ejetar a lanceta

Segurando o dispositivo de punção virado para baixo, empurre a patilha para a frente até a lanceta sair do dispositivo de punção. Se a lanceta não for corretamente ejetada, arme o dispositivo e, em seguida, faça deslizar o controlo de ejeção para a frente até a lanceta sair.



4. Voltar a colocar a tampa do dispositivo de punção

Volte a colocar a tampa no dispositivo; rode a tampa ou empurre a tampa a direito para a fixar.

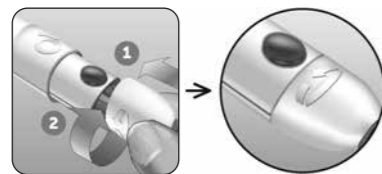

Certifique-se de que a tampa está alinhada conforme apresentado na imagem.



Elimine a lanceta usada com cuidado após a sua utilização para evitar lesões acidentais por picada. As lancetas usadas podem ser consideradas resíduos de risco biológico na sua região. Certifique-se de que cumpre as recomendações do seu profissional de saúde ou as regulamentações da sua região para uma eliminação adequada.

Armazenar o seu dispositivo de punção

Não existem condições de armazenamento especiais. Armazene no estojo de transporte fornecido com o sistema.

Limpar o dispositivo de punção e a tampa

Consulte o Manual do Utilizador ou o Guia do Utilizador fornecido com o seu medidor quanto às instruções de limpeza e desinfecção. Se o Manual do Utilizador ou o Guia do Utilizador não incluir instruções para este dispositivo de punção e tampa, siga as instruções abaixo.

Para limpar estes acessórios, passe um pano macio humedecido com água e detergente neutro. **Não** mergulhe o dispositivo de punção em líquidos.

Para desinfetar estes acessórios, prepare uma solução com uma parte de lixívia para nove partes de água. Limpe o dispositivo de punção com um pano macio humedecido com essa solução. Mergulhe **apenas a tampa** nesta solução durante 30 minutos. Após a desinfecção, limpe rapidamente com água e deixe ambos secar naturalmente.*

*Siga as instruções do fabricante relativamente ao manuseamento e armazenamento de lixívia.

O NOSSO COMPROMISSO PARA CONSIGO:

O nosso objetivo é oferecer ao utilizador produtos de cuidados de saúde de qualidade e um serviço de apoio dedicado ao cliente. Se não estiver totalmente satisfeito(a) com este produto, se o produto deixar de funcionar, se ocorrer um defeito ou se tiver alguma questão sobre a utilização de qualquer produto OneTouch®, contacte o Serviço de apoio a clientes. Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente OneTouch® (chamada gratuita): 800 201 203. Horário de funcionamento, dias úteis, das 09:00 às 18:00. Se não conseguir contactar o Serviço de Apoio ao Cliente, contacte o seu profissional de saúde para o aconselhar.

Se ocorrer um incidente grave durante a utilização do dispositivo de punção OneTouch® Delica® Plus, contacte imediatamente o serviço de Apoio ao Cliente. Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente OneTouch® através do número 800 201 203 (chamada gratuita). Horário de funcionamento, dias úteis, das 09:00 às 18:00. Ou contacte por e-mail: contacto.pt@onetouch.com. Deve contactar também a sua autoridade competente local. As informações de contacto para o seu país podem ser encontradas em:

<https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts>

Um incidente grave é um incidente que resultou ou poderia ter resultado no seguinte:

- Morte de um paciente, utilizador ou outra pessoa;
- Deterioração grave temporária ou permanente do estado de saúde de um paciente, utilizador ou de outra pessoa; ou
- Uma ameaça grave à saúde pública.

Descripción de los símbolos

Para ver una descripción completa de todos los símbolos utilizados, consulte la Guía del usuario incluida con el sistema.

	Precauciones y advertencias: Consulte el Manual del usuario y la documentación incluida con el sistema si desea información relativa a la seguridad.
	Consulte el Manual del usuario
	Fabricante
	No reutilizar
	Esterilizado por irradiación
	No eliminar con los residuos generales
	Fecha de caducidad
	Producto sanitario
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Número de lote

Descrição dos símbolos

Para uma descrição completa de todos os símbolos utilizados, consulte o Guia do Utilizador que acompanha o seu sistema.

	Advertências e avisos: Consulte o Guia do Utilizador e os folhetos fornecidos com o seu sistema para obter informações de segurança.
	Consultar as instruções de utilização
	Fabricante
	Não reutilizar
	Esterilizado por irradiação
	Não se destina a ser eliminado com os resíduos indiferenciados
	Data limite de utilização
	Dispositivo médico
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Número de lote

Reglamento (UE) 2017/745/Reglamento UE 2017/745:

Dispositivo de punción/Dispositivo de punção

MDD 93/42/CEE/DDM 93/42/CEE:

Lancetas/Lancetas
1639

Asahi Polyslider Co., Ltd.
860-2 Misaki, Maniwa
Okayama 719-3226, Japan

Importado por./Importado por:
 LifeScan Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 18
40547 Duesseldorf, Germany

OneTouch®
AW 07195703A
Fecha de rev.:/Data da rev.: 04/2021
© 2018-2021 LifeScan IP Holdings, LLC

